



Rotavírus (Teste Rápido)

Diagnóstico rápido para *Rotavírus* com tecnologia alemã e baixo custo!

Para o diagnóstico do rotavírus, o vírus mais comum e causador de diarreia e gastroenterite viral, trouxemos duas opções de kit da marca r-Biopharm por teste rápido.

RIDA® QUICK Rotavírus

O RIDA® QUICK Rotavírus é um teste rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa de Rotavírus nas amostras de fezes.

Este teste rápido imunocromatográfico possui anticorpos específicos dispostos utiliza anticorpos monoclonais contra a proteína VP6 do interior do cápside, oferecendo ao teste uma alta sensibilidade e especificidade.

RIDA® QUICK Rotavírus (Tiras e Cassete)

Vantagens

- Detecção de antígeno por Teste Rápido
- Identificação do mais comum agente causador de enterites com uso de **anticorpos monoclonais**.
- Alta sensibilidade e especificidade garantem resultados confiáveis para diagnóstico de rotinas.
- Uma tecnologia inovadora com coloração diferenciada para os patógenos
- Reagentes pronto-para-uso
- Disponíveis em dois formatos (Tiras e cassete)

Procedimento técnico



Preparo de amostra: diluir com tampão de extração 1:11

1. Tampão de extração

Pipetar 1mL de tampão de extração em um tubo de teste limpo

2. Adição de amostra

Adicionar 100µL em caso de fezes líquidas ou 50-100mg em caso de fezes sólida.

3. Homogeneização

Homogeneizar a amostra em vórtex ou por sucção e ejeção de suspensão de amostra usando pipetas descartáveis.



Sedimentação

Por precipitação (3-5min) ou por curta centrifugação de (1-3min/1600 g).

sobrenadante limpo precipitado

Teste cassete (teste único)




Teste cassete (teste combinado)




Apresentação dos kits:

Teste	Rotavírus	Rotavírus
Formato	Tira	Cassete
nº testes	25	20
Incubação	5 minutos	5 minutos
Resultado	qualitativo	qualitativo

Teste tiras (teste único)

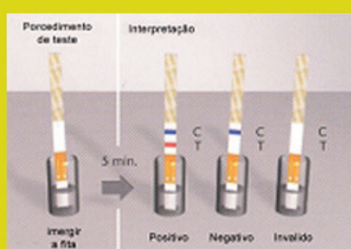

Teste tiras (teste combinado)

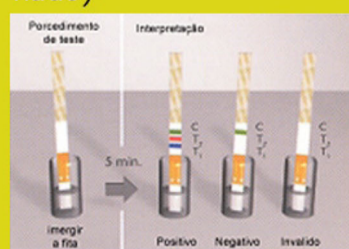

r-biopharm



CLIQUE AQUI e acesse nosso hotsite exclusivo para o congresso!

43º Medicina laboratorial e segurança do paciente

Congresso Brasileiro de Patologia Clínica
Medicina Laboratorial
exposição técnico científica

2009

ATENÇÃO: Visite nosso stand n. 142

15 a 18 de agosto
Belo Horizonte

Expominas BH

Centro de Feiras e Exposições George Norman
Av. Amazonas nº 6030 - Gameleira
30510-000 Tel/fax. (31) 3217-7814